

Santo Domingo, D. N.
26 DE DICIEMBRE 2024

HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL

Al : **Dra. Mabel Jones**
Directora Hospital Dr. Robert
Su Despacho.

Vía : **Lic. Gisel Del Carmen Díaz De Rodríguez**
Administradora Hosp. Dr. Robert Reid Cabral (INTERINA)

Asunto : **REMISIÓN POA/2025**

Estimadas Señoras:

A los fines pertinentes, tenemos a bien remitirle EL PLAN OPERATIVO ANUAL correspondiente al año 2025 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

Nuestro POA tiene el orden y contenido siguiente:

- INTRODUCCION
- Objetivos Generales
- Objetivos Específicos
- Distribución de Recursos
- Cronograma del Plan de Mantenimiento
- Generalidades

DARLIN ABREU CRUZ
Encargado de mantenimiento

Copia:

- ENCDA. SERVICIOS GENERALES
- PLANIFICACION



I. **INTRODUCCION**

GENERALIDADES

El Hospital Infantil Robert Reid Cabral, que fuera fundado en su locación actual, hace ya alrededor de siete décadas, es en la actualidad DE TERCER NIVEL. Es decir que su complejidad implica prestaciones médicas y quirúrgicas con presencia de todas las subespecialidades y en función de lo cual, tiene uso intensivo de equipamiento, inclusive de alta tecnología y recursos humanos a ese nivel.

Las características descritas de longevidad, amplitud, intensidad y complejidad en general, implican una ardua labor de mantenimiento en sus diferentes tipos y variadas expresiones y disciplinas.

EL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA/2024 es asumido por EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO como la herramienta más importante para dar respuestas efectivas a las necesidades de mantenimiento en las áreas y disciplinas de ELECTRICIDAD, CLIMATIZACION, SISTEMAS DE AGUA y AIRE COMPRIMIDO, FONTANERIA y ESTRUCTURAS, porque identifica y traza sus objetivos, los ejes y actividades principales de la acción departamental, en el marco de la visión estratégica de las instancias superiores.

EL POA, que se viabilizará teniendo como base todo el SISTEMA GESTION MANTENIMIENTO ---- SGM---- en el cual se considera y organiza EL MNTTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, RUTINARIO Y DE REHABILITACION.

En el aspecto organizativo, considera también la necesidad de completar, reforzar algunas disciplinas del mantenimiento.

II. LINEA ESTRATEGICA:

AVANZAR CONTRA LA ARTESANIA E IMPROVIZACION EN LA OPTICA DE EFICIENTIZAR LOS ESFUERZOS Y OBTENCCION DE MAS Y MEJORES RESULTADOS DE LA LABOR GENERAL DE MANTENIMIENTO ,APOYANDO DE MANERA INTEGRAL LA PROCURA DE QUE EL HOSPITAL CUMPLA A CABALIDAD SU FUNCION Y COMPROMISO EN CUANTO CENTRO DE SALUD DE TERCER NIVEL.



III. OBJETIVOS GENERALES ESPECIFICOS:

1. IMPLEMENTAR PROGRAMAS EFECTIVOS DE MANTENIMIENTO, AUMENTANDO EL INDICE DE EJECUCION Y DISMINUYENDO EL INDICE DE PENDIENTES.
2. LOGRAR AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA Y AUTOMATIZARLO, BLINDANDO ASI EL SERVICIO DE CARGA DE POTENCIA.
3. DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO DEL ESENCIAL SISTEMA DE AGUA DE SERVICIO.
4. MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LA CONDICION DE CLIMATIZACION DE LAS AREAS.
5. DISMINUIR EL COSTO DE LA ILUMINACION AL TIEMPO QUE ELIMINEMOS LAS EMISIONES DE VAPOR DE MERCURIO, PROPICIANDO UN MEDIO AMBIENTE MAS SANO Y AMIGABLE.

Sin otro particular

ATT:



Copia:

- ENCDA. SERVICIOS GENERALES
- PLANIFICACION



ING: JUAN BERNARDO BATISTA FANTASIA
Supervisor Electromecánico

**MANTENIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL POA-2025
GENERAL - PARTICULARIZADO**

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO GENERAL	ACTIVIDADES	FRECUENCIA	PERIODO	RESPONSABLE	OBSERV.
1	ELECTRICIDAD							
1	PLANTA ELECTRICA VOLVO - PENTA	AREA DE POTENCIA	BUENO	<ul style="list-style-type: none"> •INSPECCION GENERAL DE FLUIDOS, COMBUSTIBLE, BATERIA. •PRUEBA 15 MINUTOS. •PARAMETROS OPERACIONES 	2/SEMANA	ENERO/DICIEMBRE	SUPERVISOR/IEM	LA FRECUENCIA ES VARIABLE
2	PLANTA ELECTRICA VOLVO - PENTA	AREA DE POTENCIA	BUENO	MNTTO PREVENTIVO: CAMBIO ACEITE, COOLANT, FILTROS. INSPECCION Y LIMPIEZA DISPOSITIVOS DE CONTROL.	1/AÑO	MAYO/JUNIO	ENCDO. MNTTO/SUP.IEM	SERVICIO EXTERNO
3	BANCO DE TRANSFORMADORES 225KVA. CONSULTAS	CONSULTAS TECHO AL ESTE	BUENO	<ul style="list-style-type: none"> •INSPECCION Y PRUEBAS ACEITE •EMPAQUES •CONECTORES •CABLES •CUBETO 	1/2 AÑOS	ENERO/JUNIO	ENCDO. MNTTO/SUP.IEM	SERVICIO EXTERNO
4	TRANSF. PAG-MOUNTED 750 KVA.	SOBRE CASETA DESPACHO DE CARGA PATIO NORTE	BUENO	<ul style="list-style-type: none"> •INSPECCION GENERAL •EMPAQUES •CONECTORES •CABLES •CUBETO •ACEITE 	1/2 AÑOS	MAYO/JULIO	ENCDO. MNTTO/SUP.IEM	SERVICIO EXTERNO
5	TRANSFORMADOR PADMOUNTED 750 KVA.	AL LADO CASETA DESPACHO DE CARGA PATIO NORTE	BUENO	<ul style="list-style-type: none"> •INSPECCION GENERAL •EMPAQUES •CONECTORES •CUBETO •ACEITE 	1/2 AÑOS	JULIO/AGOSTO	ENCDO. MNTTO/SUP.IEM	SERVICIO EXTERNO
6	ILUMINACION	INTERIOR Y EXTERIOR EDIFICIOS	BUENO	<ul style="list-style-type: none"> •INSPECCION •SUSTITUCION LUMINARIAS 	K	ENERO/DICIEMBRE	ENCDO. MNTTO/SUP.IEM	SERVICIO EXTERNO
7	INVERSORES	EDIF. COCINA-TECHO	BUENO	<ul style="list-style-type: none"> •INSPECCION VARIABLES OPERACIONES •ORGANIZAR •LIMPIAR 	1/SEMANA	ENERO/DICIEMBRE	ENCDO. MNTTO/SUP.IEM	SERVICIO EXTERNO
8	CUARTOS ELECTRICOS	INT. EDIF.	BUENO		1/SEMANA	FEBRERO /DICIEMBRE	ENCDO. MNTTO/SUP.IEM	



**MANTENIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL POA-2025
GENERAL - PARTICULARIZADO**

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO GENERAL	ACTIVIDADES	FRECUENCIA	PERIODO	RESPONSABLE	OBSERV.
II	SISTEMA AGUA DE SERVICIO Y TRATADA							
1	PREVENTIVO ESTACIONES DE BOMBEO DE BOMBEO 1/2/3/4	PATIO	REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> • INYECCION Y LIMPIEZA • PINTURA • VERIFICAR CONDICION DE TERMINALES BREAKERS 	1/6 MESES	ENERO/DICIEMBRE	ENCDO MNTTO	SERVICIO MIXTO (INT/EXT)
2	CISTERNAS	PATIO	BUENO	LIMPIEZA PROFUNDA E INSPECCION	1/AÑO	FEBRERO /OCTUBRE	ENCDO MNTTO	SERVICIO EXTERNO
3	CISTERNAS	PATIO	BUENO	<ul style="list-style-type: none"> • HABILITAR INTERRUPTORES DE BOMBAS POR MUY BAJO NIVEL 	1/AÑO	MAYO/JULIO	ENCDO MNTTO	SERVICIO EXTERNO AUTOMATIZACION PROTECCION BOMBAS
4	PLANTA OSMOSIS	AL LADO DE LA COCINA	BUENO	<ul style="list-style-type: none"> • INSPECCION DE SISTEMAS • CAMBIO DE PARTES SI APLICA • CAMBIO DE FILTROS 	1/6 MESES	FEBRERO /MARZO	ENCDO MNTTO	
5	SISTEMA INSTALACIONES SANITARIAS	INTERIOR EDIF.	BUENO	<ul style="list-style-type: none"> • INSPECCION • SUSTITUCION DE PARTES • CORRECTIVOS 	DIARIO	ENERO/DICIEMBRE	ENCDO MNTTO	
6	LINEAS (TUBERIAS, VALVULAS, ACCESORIOS, BAÑOS	PATIO E INTERIOR EDIFICIOS	BUENO	<ul style="list-style-type: none"> • INSPECCIONAR PROBABLES FUGAS 	1/DIA	ENERO/DICIEMBRE	ENCDO MNTTO	SE PROCURA DISMINUIR GASTO POR FUGAS
III	SISTEMA AGUAS SERVIDAS							
1	REGISTROS SEPTICOS	PATIO	BUENO	APLICAR LIMPIEZA	1/4 MESES	ENERO /SEPTIEMBRE	ENCDO MNTTO	
2								



**MANTENIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL POA-2025
GENERAL - PARTICULARIZADO**

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	FREC.	PERIODOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
IV	ACONDICIONADORES AIRE							EN GENERAL VER ADJUNTO
1	APLICAR PLAN PREVENTIVO	INT. EDIF.	BUENO	*	ENERO/ DICIEMBRE	*	ENCDO MNTTO PEDRO	S.INTERNO S.EXTERNO
2	SUSTITUCION DE UNIDADES COLAPSADAS	INT. EDIF.	MALO	VARIABLE	ENERO/ DICIEMBRE	CAMBIO	ENCARGADO MANTENIMIENTO	S.INTERNO S.EXTERNO
3	UNIDADES EN OPERACION	INT. EDIF.	BUENO	K	ENERO/ DICIEMBRE	S G M	ENCARGADO MANTENIMIENTO	AGIL RESPUESTA
V	SISTEMA AIRE COMPRIMIDO							
1	COMPRESORES	ODONTOLOGIA EDIF. PRINCIPAL	BUENO	DIARIO	ENERO/ DICIEMBRE	• VER NIVEL ACEITE Y PARAMETROS OPERACIONALES	ENCARGADO MANTENIMIENTO	
2	LINEAS O TUBERIAS DE AIRE	INT /EXT EDIF.	BUENO	SEMANAL	ENERO/ DICIEMBRE	VERIFICAR NO FUGAS	ENCARGADO MANTENIMIENTO	

**MANTENIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL POA-2025
GENERAL - PARTICULARIZADO**

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	FREC.	PERIODOS	ACTIVIDADES	RESP.	OBSERV.
VI	ESTRUCTURA							
1	CASETA DE PLANTA ELECTRICA	LADO NORTE EDIF. PRINCIPAL	FILTRACION TECHO	1/AÑO	FEBRERO/ABRIL	• HECHAR FINO • CORRECCION DE GRIETAS	ENCARGADO MANT. PERALTA	AGUA INSI DE AFECTA PUNTA SU SEGURIDAD OPERATIVA
2	CASSETAS PLANTA Y DESPACHO DE CARGA	LADO NORTE EDIF. PRINCIPAL	FALTA PINTURA	1/AÑO	FEBRERO/ABRIL	PINTAR	ENCADO. MANTTO MIGUEL/PINTOR	831/01MT



3	EXPLANADA FRONTAL PLANTA	LADO NORTE EDIF. PRINCIPAL	MUCHOS ESCOMBROS Y MALEZA	1/AÑO	MAYO-JUNIO	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIAR • ELIMINAR MALEZA • ACONDICIONAR CON CASCAJO- GRAVA 	ENCARGADO	120 MT ²
4	VERJA PERIMETRAL	PERIMETRO NORTE Y SUR-ESTE	MUY BAJA ALTURA	1/AÑO	MARZO/ DICIEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> • AUMENTAR ALTURA BLOQUES Y ADICIONAR ALAMBRE TRINCHERA 	ENCARGADO	
5	TANQUE PRINCIPAL COMBUSTIBLE PLANTA	AREA POTENCIA ELECTRICA	PITTING MODERADOS	1/AÑO	JUNIO	MANTENIMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR	ENCARGADO	S. I.
6	EDIFICIOS PRINCIPALES CONSULTAS/ U - 1	TECHOS EDIFICIOS	FILTRACIONES	1/SEMANA	ABRIL-JULIO	HERMETIZAR CORREGIR SELLAR FISURAS	ENCARGADO	S. I.
7	EDIFICIOS TECHO-DRENAJES	EDIFICIOS	BUENO	6 AÑOS	ENERO/ DICIEMBRE	LIMPIAR	ENCARGADO	
VII	MNTTO CORRECTIVO	TODO EL RECINTO	VARIADO	MANTENER BUENA RESPUESTAS A LAS NECESIDADES	DIARIO	ENERO/DICIEMBRE	ENCDO MNTTO	



**Plan de mantenimiento
Electromedicina
Año 2025**

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
INCUBADORA	UCIN	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Verificación de componentes , Revisión de motor, Revisión termostato control RPM, Inspección de la cúpula y seguros puertas , Verificación y comprobación del panel frontal, Revisión de la tarjeta mother board ,Cambio termostato control de temperatura (si requiere), Revisión y ajuste de temperatura , Revisión y cambio de filtro bacteriológico , Verificación de alarmas , Reemplazo de batería (si es necesario) , Juego de mangas (si es necesario) , Calibración general , Limpieza general , Test de funcionamiento	Hospital Robert Reid Cabral
ASPIRADOR (2)	QUIROFANO, UCI, EMERGENCIA, SALAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral
CAMILLA	QUIROFANO, UCI, EMERGENCIA, SALAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas, prueba de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET		BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral
(2) LAMPARA CUELLO DE GANSO	QUEMADOS, EMERGENCIA, URGENCIAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Comprobación alimentación eléctrica , Cambio de cable alimentación AC (si requiere) , Cambio de portalámpara (si requiere) , Cambio portabombillos (si requiere) , Reemplazo bombillo halogeno (de ser necesario) , Cambio bombillo corriente (si requiere), Reparación fuente alimentación (si requiere) , Cromado general (si es necesario) , Cambio interruptor encendido (si es necesario) , Limpieza y ajuste general , Comprobación de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral
BALANZA PEDIATRICA	UCIN, CONSULTA, INFECTOLOGIA.	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	Hospital Robert Reid Cabral
UNIDAD ODONTOLOGICA	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Prueba de funcionamiento, mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión	Hospital Robert Reid Cabral
COMPRESOR DE AIRE	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Calibración de presión, chequeo fuga de aire, calibración apagada y encendido automático, verificación línea de tensión 110volt.	Hospital Robert Reid Cabral

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
NEVERA	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral
AMARGAMADOR	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpie el equipo con un trapo húmedo y detergente suave, Verifique que realice un correcto encendido y apagado levantando la puerta de seguridad al dar la orden de inicio, Evalúe el sonido producido, Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Verificar contactos de la tarjeta electrónica, Revisión y lubricación del motor, Verificación de estado de funcionamiento de microswitch, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores, Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados.	Hospital Robert Reid Cabral
HORNO ESTRILIZADOR	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Se realiza limpieza del equipo, Revisión de voltaje de red y polo tierra, Revisión del regulador, controlador o termostato mecánico, según sea el caso, Limpieza de la tarjeta electrónica y componentes eléctricos, Realizar la prueba de funcionamiento del equipo haciendo tomas de temperatura en 5 puntos diferentes y en diferentes tiempos con una termocupla (Fluke), Verificación de temperatura ambiente interna durante 24h. Revisar temperatura y humedad ambiente externa con patrón calibrado, Verificar Integridad y funcionamiento de sensor de control.	Hospital Robert Reid Cabral

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
(3) MICROSCOPIO DE 2 LENTES Y 4 FOCOS	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral
MICROCENTRIFUGA (3)	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Hospital Robert Reid Cabral
MICRO CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Hospital Robert Reid Cabral
MICROSCOPIO	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral
CENTRIFUGA DE 6 TUBOS (2)	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Hospital Robert Reid Cabral
MAQUINA DE HEMOGRAMA	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza, mantenimiento general, rastreo y limpieza de manguera de diluyente internamente, comprobación de (startus), calibración, lubricación de motor de jeringa y limpieza de sensor de jeringa Comida de muestras.	Hospital Robert Reid Cabral

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
NEVERA	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	Hospital Robert Reid Cabral
ROTADOR DE VDRL	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza superficialmente el equipo secándolo después con un paño seco. Si tiene manchas, utilice un poco de detergente con un paño ligeramente humedecido con agua. Si el material antideslizante de la plataforma puede quitarse hágalo y lávelo, Verifique el funcionamiento de las partes mecánicas del equipo: Plataforma, ejes y engranajes, lubrique si es necesario, Verifique los controles de velocidad y de tiempo para determinar si se encuentra dando los tiempos y velocidades fijados, Revise la alimentación eléctrica del equipo para detectar posibles peladuras, cortes o degradación del material aislante del conductor, Importante que cuando tenga un problema con el equipo lo reporte de inmediato al Departamento de Mantenimiento.	Hospital Robert Reid Cabral
COLORIMETRO	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión y limpieza de sistema electrónico (tarjetas electrónicas, cableado, contactos, teclado, display), Revisión y limpieza cámara porta-muestras, Verificación de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
EQUIPO DE QUIMICA BS-200	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Prueba de funcionamiento, chequeo sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lamp. Halógena, limpieza, mantenimiento general.	Hospital Robert Reid Cabral
MICROSCOPIO (2)	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral
CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Hospital Robert Reid Cabral
(2) AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral
(3) PIPETAS AUTOMATICAS	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Verificación sistema de succión, verificación sistema calibración de micro litros, limpieza y lava do general.	Hospital Robert Reid Cabral
MICROSCOPIO DE 2 LENTES Y 4 FOCOS	BACIOSCOPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral


DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ASPIRADORES	UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Hospital Robert Reid Cabral
DESFILADOR	UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión de componentes, Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, Reparación fuente de alimentación, Ajuste printer calibración térmico (SI REQUIERE), Verificación de desfibrilación sincrónica, Revisión kit baterías, Prueba del cable de paciente, Limpieza y ajuste general, Ajuste del armazón.	Hospital Robert Reid Cabral
MONITOR	UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo	Hospital Robert Reid Cabral
ELECTROCARDIOGRAMA	CONSULTA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos de succión, chequeo parámetros	Hospital Robert Reid Cabral
NEBULIZADOR	SALA DE NEBULIZACION, UCIP, SALAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	Hospital Robert Reid Cabral

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
EQUIPO DE LARINGOSCOPIA	QUIROFANO, UCIP, UCIN, SALAS, QUEMADOS, EMERGENCIA, URGENCIAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento	Hospital Robert Reid Cabral
LARINGOSCOPIO	QUIROFANO, UCIP, UCIN, SALAS, QUEMADOS, EMERGENCIA, URGENCIAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento	Hospital Robert Reid Cabral
MONITOR	QUIROFANO, UCIP, UCIN, SALAS, QUEMADOS, EMERGENCIA, URGENCIAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo	Hospital Robert Reid Cabral
GLUCOMETRO	UCI	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Evite que la suciedad, polvo, sangre, solución de control o agua ingresen al glucómetro a través del puerto de prueba o del puerto de datos, Almacene el glucómetro, las tiras reactivas y la solución de control en el estuche después de cada uso, en un lugar fresco y seco, No los refrigere, Utilice un paño humedecido con agua y detergente suave para limpiar el exterior del glucómetro.	Hospital Robert Reid Cabral
AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, limpieza general.	Hospital Robert Reid Cabral

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MONITOR	CIRUGIA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo	HRRC
ASPIRADOR	CIRUGIA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza General, Prueba de funcionamiento.	HRRC
CAUTERIO	CIRUGIA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión y arreglo de perillas, Limpieza general interna, Revisión y arreglo de display, Limpieza general externa, Revisión de cable de energía y fusibles, Prueba de alarmas y conector de placas, Verificación de funcionamiento, con pedal y lápiz, Verificación de funcionamiento con cable y pinza bipolar.	HRRC
MESA DE CIRUGIA	CIRUGIA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonera, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	HRRC

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ASPIRADOR DE CIRUGIA	CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste deconexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	HRRC
MESA DE CIRUGIA	CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	HRRC

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
NEGATOSCOPIO	YESO/ORTOPEDIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable ac, Mantenimiento preventivo.	Hospital Robert Reid Cabral
APARATO PARA EXAMINAR OIDOS	OTORRINOLARINGOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza y desinfección. Cambio de las baterías, asegurándose de que no haya signos de corrosión u oxidación. Siempre reemplace AMBAS pilas. Se recomiendan baterías alcalinas. Retire las baterías del mango si el instrumento No se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.	Hospital Robert Reid Cabral

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
SONOGRAFO 	SONOGRAFIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y Mantenimiento preventivo.	Hospital Robert Reid Cabral
ELECTROCARDIOGRAMA	ELECTRO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, Verificación de componentes y periféricos, Calibración General, Cambio juego de chupas (si requiere), Juego de Electroodos para extremidades (si es necesario), Calibración, ajuste y limpieza general	Hospital Robert Reid Cabral
APARATO DE OFTALMOLOGIA	CONSULTA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, Verificación de componentes y periféricos, Calibración General, Calibración, ajuste y limpieza general	Hospital Robert Reid Cabral