

MICRO CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	LABORATORIO CLINICO	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Preventivo	Trimestral																
MICROSCOPIO	LABORATORIO CLINICO	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral																
CENTRIFUGA DE 6 TUBOS (2)	LABORATORIO CLINICO	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Preventivo	Trimestral																
MAQUINA DE HEMOGRAMA	LABORATORIO CLINICO	Limpieza, mantenimiento general, rastreo y limpieza de manguera de diluyente internamente, comprobación de (startus), calibración, lubricación de motor de jeringa y limpieza de sensor de jeringa Comida de muestras	Preventivo	Trimestral																
NEVERA	LABORATORIO CLINICO	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	Preventivo	Trimestral																
ROTADOR DE VDRL	LABORATORIO CLINICO	Limpieza superficialmente el equipo secándolo después con un paño seco. Si tiene manchas, utilice un poco de detergente con un paño ligeramente humedecido con agua. Si el material antideslizante de la plataforma puede quitarse hágalo y lávelo, Verifique el funcionamiento de las partes mecánicas del equipo: Plataforma, ejes y engranajes, lubrique si es necesario, Verifique los controles de velocidad y de tiempo para determinar si se encuentra dando los tiempos y velocidades fijados, Revise la alimentación eléctrica del equipo para detectar posibles peladuras, cortes o degradación del material aislante del conductor, Importante que cuando tenga un problema con el equipo lo reporte de inmediato al Departamento de Mantenimiento	Preventivo	Trimestral																
COLORIMETRO	LABORATORIO CLINICO	Limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión y limpieza de sistema electrónico (tarjetas electrónicas, cableado, contactos, teclado, display), Revisión y limpieza cámara porta-muestras, Verificación de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral																
EQUIPO DE QUIMICA BS-200	LABORATORIO CLINICO	Prueba de funcionamiento, chequeo sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lamp. Halógena, limpieza, mantenimiento general.	Preventivo	Trimestral																
MICROSCOPIO (2)	LABORATORIO CLINICO	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral																

Los Mantenimientos correctivos se realizan según demanda

